



BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.

WAARSCHUWING


RISICO VAN EXPLOSIE ALS DE BATTERIJEN DOOR EEN VERKEERD TYPE WORDEN VERVANGEN.

WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN


! i Informatie netspanningsadapter: Hoofdtoestel en Medaillon: 6V DC 0,6A, 3.6W. Vtech Telecommunications Limited. Model: S005BNV0600060(EU), S005BNB0600060(UK)

! i Oplaadbare batterij: Model: KH-AAAJ600-D x 3pcs. 600mAh. Corun.

Basisstation / Handset

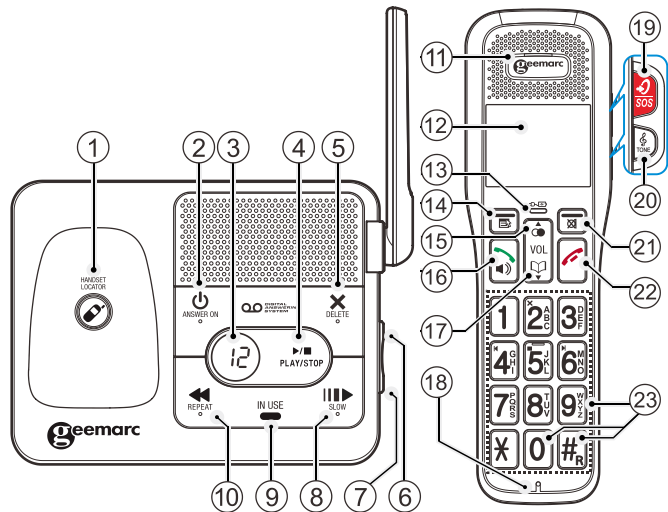

Het basisstation aansluiten

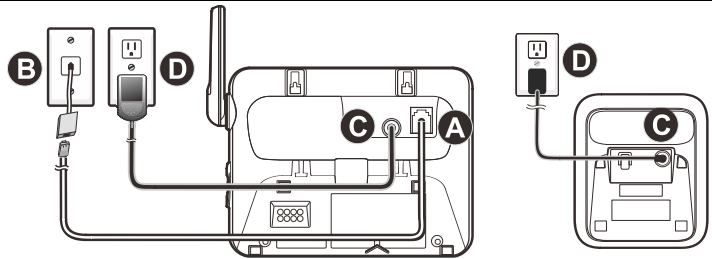

INHOUD van het PAKKET

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1 Basisstation | 1 Draadloze handset |
| 1 Voedingsadapter | 1 Telefoonaansluitsnoer |
| 3 NiMH batterijen | 1 Beknopte gebruikershandleiding. |

INSTALLATIE

De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbindt de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en verbindt daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

De batterij aansluiten

Schuif het batterijdeksel naar beneden.

Zet de drie batterijen op de aangegeven plaats; let op de juiste polariteit (+ / -).

Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

De batterijen opladen

Laadt de batterijen minstens 16 uur op als u deze voor de eerste keer oplaadt.

OVERZICHT

Basisstation

1. /HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

2. /ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)

Druk op deze knop om het ingebouwde antwoordapparaat aan of uit te zetten. Het systeem knippert om u te laten weten dat er een nieuw bericht is.

3. BERICHTENTELLER

Toont het volgnummer van de opgenomen berichten.

4. /AFSPELEN/STOP Druk op deze knop om het afspelen van berichten te starten of te stoppen.

5. /WISSEN

Druk op deze knop om het bericht dat nu afspeelt te wissen.

Druk lang op deze knop om alle oude berichten te wissen wanneer de telefoon **niet** gebruikt wordt.

6. /VOL (▲)

Druk op deze knop om het volume te verhogen tijdens het afspelen van een bericht. Terwijl de telefoon inactief is, drukt u op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen.

7. /VOL (▼)

Druk op deze knop om het volume te **verlagen tijdens het afspelen van een bericht. Terwijl de telefoon inactief is**, drukt u op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen.

8. /LANGZAAM

Druk op deze knop om de afspeelsnelheid te **vertragen tijdens het afspelen van een bericht.**

9. IN GEBRUIK

Het staat **AAN** wanneer een handset(s) wordt/worden gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.

10. /HERHALEN

Druk op deze knop om een bericht te **herhalen tijdens het afspelen van een bericht.**

Druk tweemaal op deze knop om het vorige bericht af te spelen.

Handset

11. OORDOPJE

12. LCD DISPLAY

13. OPLAADLAMPJE (-D-)

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

14. MENU/OK ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

15. OMHOOG/OPROEPLIJST ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verhogen.

16. SPREKEN AAN () IN DE LUIDSPREKERSTAND ()

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers:

Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

Telefoon is actief: Druk hier nogmaals op om over te gaan naar de luidsprekerstand. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

17. OMLAAG / TELEFOONBOEK ()

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verlagen.

18. MICROFOON

19. VOLUMEVERSTERKER / SOS () / SOS

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de VOLUMEVERSTERKER functie te activeren/deactiveren.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 3 seconden ingedrukt om de in uw handset geprogrammeerde reeks noodoproepen te activeren.

In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.

20. TOON

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om de hoge of lage frequentie te verhogen.

21. ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) ()

In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

22. SPREKEN UIT ()

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm.

In de te bewerken/menu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

23. ALFANUMERIEKE TOETSENBOARD. STERRETJE (),

HEKJE ()

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een getal/teken/  /  toe te voegen.

 tijdens een gesprek: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om Flash (Opnieuw bellen) te activeren.

 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.

UW HANDSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKEN

Nadat u de batterijen erin heeft gezet, wordt u gevraagd om uw taal te

kiezen m.b.v. de  /  (15/17) toetsen. Druk op **MENU/OK** () (14) om dit te bekrachtigen; voer daarna de datum in m.b.v. het toetsenbord en

bekrachtig dit door op **MENU/OK** () (14) te drukken. Voer de juiste tijd in

m.b.v. het toetsenbord en bekrachtig dit door op **MENU/OK** () (14) te drukken.

MENU-INSTELLINGEN

De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:

Druk op de **Menu/OK** () (14) knop om het hoofdmenu te openen. Gebruik daarna de  /  knoppen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op de **Menu/OK** () (14) knop te drukken.

Handset

OPROEPLOG

► BEKIJK DE LIJST

onder een rubriek: ► DETAILS ►VOEG BY TB ►VOEG BY BL ►VOEG FOTOG ►WISSEN ►ALLES WISSEN

DIRECT GHEUG: M1 tot M4

TELEFOONBOEK

► ALLES ►SNELDRAAIEN ►VIP (BELANGRIJK PERSOON)

onder een rubriek: ►TOEVOEGEN ►BEKIJKEN ►BEWERKEN ►WISSEN ►ALLES WISSEN ►VOEGBY VIP ►VOEG FOTOG ►VOEG BY SD ►STATUS

OPROEPEN BLOKKEREN

ZWARTE LIJST (onder een rubriek: ►TOEVOEGEN ►BEKIJKEN ►BEWERKEN ►WISSEN ►ALLES WISSEN ►VOEG FOTOG ►STATUS ►INSTELLING (BLOKKEERSTAND ►GEEN NUMMER)

INTERCOM: ►HANDSET ►BASISSTATION ►ALLES

INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION

► BS BEL ►BELVOLUME ►FLASH TIJD ►EERSTE BEL

INSTELLINGEN VAN DE HANDSET

► BEL INSTELLING ►TOON INSTELLING ►AUTOM. BOOST ►TEKST TAAL ►DATUM & TIJD ►REGISTRATIE ►STANDAARD INSTEL.

SOS INSTELLEN: ►SOS NUMMER ►SOS BERICHT ►SOS TAAL

HERINNERING

► AAN/UIT (ALARM 1 TOT 10) ►(EENMALIG / DAGELIJKS / MA - VR / ZA - ZON)

CYFRS SPRK: ►AAN ►UIT

STEL APP: SIGNAAL CCHECK►DEURBEL

APPARATEN: DEURBEL/ WRSCHURW* (STATUS ►LOG ►HERNOEMEN

ANTWOORDAPPARAAT

►AFSPELEN ►OUDE WISSEN ►MEMO ►TAM AAN/UIT

►TAM INSTELLEN (TAM TAAL► OPRP.TOESTS, TAM BERICHT, VERTRAAGD ANTWOORD, OPNAMETIJD, TOEGANG OP AFSTAND, WYZIG PIN ► BERICHTALARM)

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

NB: De handset is vooraf aangemeld op het basisstation.

Tot maximaal 4 handsets kunnen op een basisstation aangemeld worden.

Een handset registreren

Op het **basisstation:** Druk op het basisstation op  /**HANDSET LOCATOR** en houdt deze ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om toegang tot de registratiestand te krijgen.

Tegelijkertijd op de **Handset:** Druk op **MENU/OK** () (14). Gebruik  /  (15/17) om **HS INSTELLINGEN** te kiezen en druk op **MENU/OK** () (14).

Gebruik  /  (15/17) om **REGISTREREN** te kiezen Druk op **MENU/OK** () en **BEZIG MET REGISTREREN** wordt getoond.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

INTERCOM

Zie de gebruikershandleiding van de extra handset.

EXTRA TOESTELLEN

U kunt maximaal 4 handsets, 3 deurbellen en verscheidene signaleringen in de AD595 U.L.E. registreren. Al de toestellen zijn verbonden/geregistreerd in de fabriek als deze meegeleverd zijn; het is dan niet nodig enig toestel te registreren.

Lees de gebruikershandleiding van uw toestel als u een deurbel of signalering wilt verbinden.

TOESTEL INSTELLEN

Druk op de **MENU/OK**  **(14)** en **▼/▲** om **STEL APP.** te kiezen.

HET SIGNAAL CONTROLEREN:

DEURBEL: Druk op **MENU/OK**  **(14)** en op de knop van de deurbel om de kwaliteit van het signaal te controleren.

WRSCHUWR: Druk op **MENU/OK**  **(14)** om de kwaliteit van het signaal te controleren.

DEURBEL:

Deze functie is om het volgende in te stellen:

KLOK: Deze functie dient om de melodie en het volume van de deurbel in te stellen door op de knop van de deurbel te drukken.

OPNEMEN?: Zet het AAN om een conversatie op te nemen m.b.v. de deurbel.

DEURBEL DOORSCHAKELEN:

Deze functie stelt u in staat om de signalering van de deurbel handmatig of automatisch over te zetten naar een ander telefoonnummer.

DOORSCHAKEL MOD: stelt u in staat om de functie handmatig of automatisch te activeren of UIT te zetten.

PREINSTLNO: stelt u in staat om het telefoonnummer voor de overzetting in te voeren.

APPARATEN

In dit menu kunt u het volgende controleren:

Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **APPARATEN** te kiezen.

STATUS: Deze functie laat u weten of het toestel verbonden is.

LOG: Deze functie dient om de opsomming van acties van de deurbel te tonen.

HERNOEMEN: Deze functie dient op de naam van uw toestel te veranderen.

TELEFOONBOEK

U kunt maximaal 50 nummers met bijbehorende namen opslaan in het telefoonboek van de draadloze handset. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 10 tekens voor de naam.

Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.

Een nieuwe invoer toevoegen

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK**  **(14)** en **▼/▲** om het **TELEFOONBOEK** te selecteren en druk op **MENU/OK**  om toegang te krijgen tot de (lege) lijst in het telefoonboek.

2. Druk twee keer op **MENU/OK**  om **TOEVOEGEN** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK**  om **NUMMER** te kiezen; voer het nummer in.

4. Druk op **MENU/OK**  om **NAAM** te kiezen; voer de naam in.

5. Druk op **MENU/OK**  om dit te bewaren.

SOS NOODOPROEPEN

SOS Instellingen

U moet de SOS nummers instellen voordat u een SOS noodoproep kunt maken.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **SOS NUMMER** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om het te bewerken **SOS NUMMER (SOS 1, SOS 2, SOS 3 of SOS 4)** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK**  en kies **TOEVOEGEN** om een nieuw nummer in te voeren of **BEKIJK** om een opgeslagen nummer te veranderen.

5. Druk op **MENU/OK**  en voer een nieuw nummer in of bewerk een reeds opgeslagen nummer.

6. Druk op **MENU/OK**  om te bevestigen of op **ANNULEREN/STILMODUS**  om te wissen.

SOS Noodoproepen maken

Druk op de handset op de **SOS toets** en houdt deze 3 seconden ingedrukt om toegang tot de reeks van noodnummers van **SOS 1** tot **SOS 4** te krijgen. Een oproep zal eerst naar het **SOS 1** nummer gemaakt worden. Als **SOS 1** niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het **SOS 2** nummer opgeroepen (enzovoort).

NB: De opgeroepene moet een willekeurige nummertoe ts op zijn/haar telefoon indrukken op de SOS oproep te beantwoorden. Daarna zal de verbinding van de noodoproep open blijven als om de twee minuten een willekeurige nummertoe ts wordt ingedrukt, want anders wordt de verbinding na 10 seconden verbroken.

SOS Berichten opnemen

U kunt een aangepast SOS bericht opnemen dat afspeelt als u een SOS noodoproep maakt; zoniet dan wordt het standaard bericht afgespeeld.

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **SOS BRCHT** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **OPNEMEN** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK** om opnemen van SOS berichten te starten; “OPNEMEN” verschijnt op het display.

5. Druk op **MENU/OK**  om uw SOS bericht te bewaren.

SOS Berichten afspelen

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **SOS INSTELLEN** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **SOS BRCHT** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK**  om **AFSPELEN** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK**  om het afspelen van een SOS bericht te

starten.

5. Druk op **5** om het afspelen van een SOS bericht te stoppen.

DE SNELDRAAI-TOETSEN IN DE HANDSET INSTELLEN (TOETSEN 1 T/M 9)

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **TELEFOONBOEK** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **SNELDRAAIEN** te kiezen.

3. Druk op de **LINKER SOFTKEY** en **▼/▲** om de **SNELDRAAITOETS** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK**  om **TOEVOEGEN** of **BEKIJK** te kiezen.

5. Druk op **MENU/OK**  , voer het telefoonnummer in.

6. Druk op **MENU/OK**  om de NAAM in te voeren.

7. Druk op **MENU/ OK**  om dit te bevestigen.

Houdt 3 seconden één van de negen genummerde toetsen ingedrukt in de inactieve stand om één sneldraai-toets te gebruiken. U hoort een pieptoon ter bevestiging.

GROTE GEHEUGENTOETSEN MET FOTO'S

Deze functie is alleen beschikbaar in de CombiDect 595.

FUNCTIE VAN ZWARTE LIJST

U kunt 20 telefoonnummers blokkeren. Hiervoor moet u de zwarte lijst nummer als dit:

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **BLOK OPRP** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **ZWARTE LIJST** te kiezen.

3. Druk twee keer op **MENU/OK**  om **TOEVOEGEN** of **BEKIJK** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK**  en voer het telefoonnummer in.

5. Druk op **MENU/OK**  om de NAAM in te voeren.

6. Druk op **MENU/ OK**  om dit te bevestigen.

ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 30 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.

Het antwoordapparaat aan- of uitzetten

In de inactieve stand:

1. Druk **op** **MENU/OK**  en **▼/▲** om **ANTW SYS** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **TAM AAN/UIT** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **AAN** of **UIT** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK**  om dit te bevestigen.

Berichten afspelen op TAM

Als u nieuwe berichten heeft, zal het scherm bijv. 2 NIEUW BERICHT tonen. Dit betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en daarna bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om het **ANTW. SYS** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK**  om **AFSPELEN** te kiezen.

3. Druk opnieuw op **MENU/OK**  om het afspelen van het bericht te starten, terwijl de datum en tijd dat het bericht werd ontvangen op de display verschijnt.

4. Druk tijdens het afspelen op **▼/▲** om het volume van het bericht afspelen te veranderen.

NB: Nadat nieuwe berichten afgespeeld zijn, worden zij automatisch bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden.

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en op **▼/▲** om **STOP,LANGZ.AAN, VOORUIT, VORIGE** of **WISSEN** te kiezen om de volgende functies tijdens het afspelen uit te voeren.

• **STOP:** Stopt het bericht dat nu afgespeeld wordt en keert terug naar het ANS. MACHINE menu.

• **LANGZAAN:** Lage snelheid van de leesnelheid

• **VOORUIT:** Speelt het volgende bericht af. De datum en tijd van het volgende bericht zal getoond worden als er nog een volgend bericht is.

• **VORIGE:** Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. De datum en tijd van het bericht dat nu afspeelt zal getoond worden.

• **WISSEN:** Wist het bericht dat nu afspeelt en het volgende bericht zal gaan afspelen.

6. Druk op **MENU/ OK**  om de instelling te bevestigen.

De Beantwoordingsvertraging instellen

U kunt het aantal keren instellen dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat aan gaat en begint uw Uitgaande Mededeling (UGM) af te spelen. Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om aan te gaan na twee tot acht keer overgaan of TIME SAVER.

De TIME SAVER functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste nieuwe bericht is opgenomen – daarna schakelt het antwoordapparaat automatisch over oproepen te beantwoorden na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang heeft op afstand. Als u het antwoordapparaat belt en er is geen antwoord na 4 keer overgaan, dan zijn er geen nieuwe berichten opgenomen en u kunt ophangen voordat de oproep in rekening wordt gebracht.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om het **ANTW. SYS** te kiezen.

Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **ANTWOORDSVERTRAGING** te kiezen. Beschikbare opties zijn: **2 keer, 4 keer, 6 keer** of **8 keer overgaan** of **TOLL SAVE**.

Druk op **MENU/OK**  om dit te bevestigen.

FUNCTIE VAN BERICHTALARMERING

U hoort om de 10 seconden een pieptoon wanneer u een nieuw bericht heeft. Als u dit niet wilt horen, volg dan de volgende procedure:

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om het **ANTW.SYS** te kiezen.

Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **TAM INSTELLEN** te kiezen.

Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **BERICHTALARMERING** te kiezen.

Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **UIT** te kiezen.

Druk op **MENU/OK**  om dit te bevestigen.

NB: De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is. Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

U kunt geen nieuwe berichten wissen voordat u er naar geluisterd heeft.

ALARMERINGSFUNCTIE

U kunt 10 verschillende typen Alarm invoeren.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **HERINNERING** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om uw alarm te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK**  en **AAN/UIT** om **AAN** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK**  en voer de tijd in.

5. Druk op **MENU/OK**  en kies de frequentie.

6. Druk op **MENU/OK**  om dit te bewaren.

SPREEKFUNCTIE

U heeft de keuze om de SPREKENDE NUMMERS functie te activeren of uit te schakelen.

Activeren: Deze functie kondigt het nummer-draaien aan.

In de inactieve stand:

1) Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **CYFRS SPRK** te kiezen.

2) Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **AAN** of **UIT** te kiezen.

3) Druk op **MENU/OK**  om dit te bewaren.

FUNCTIE VAN EERSTE BELSIGNAAL

Soms zal de telefoon één keer overgaan om the laten weten dat u een voice bericht heeft. Volg de volgende procedure om dit belsignaal te verwijderen.

In de inactieve stand:

1. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **BASISSTATION INSTELLEN** te kiezen.

2. Druk op **MENU/OK**  en **▼/▲** om **EERSTE BEL** te kiezen.

3. Druk op **MENU/OK**  om **AAN** te kiezen.

4. Druk op **MENU/OK**  om dit te bewaren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisinformatie	
Goed bereik	Binnenshuis: 50m / Buitenshuis: 300m
Werkingstijd v/d handset	Stand-by tijd: 100 uur Spreektijd: ca. 10 uur
RF Parameter	
Frequentie	1,88GHz tot 1,9GHz
Aantal kanalen	10
RF vermogen	< 250mW
Voeding	
Basisstation	Invoer 100-240V 50/60Hz; Uitvoer DC6V  0.6A, 3.6W adapter
Oplader	Invoer 100-240V 50/60Hz; Uitvoer DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Handset	3 AAA oplaadbare batterijen van 1,2V/600 mAh

ONDERHOUD

Maak de behuizing met een zachte, niet pluizende doek schoon. Gebruik GEEN schoonmaak- of oplosmiddelen.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN



BEKNOPTE HANDLEIDING

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.

LET OP: Gebruik alleen de bijgeleverde batterij. Er kan explosiegevaar ontstaan als een verkeerd type batterij wordt gebruikt voor het moederapparaat. De batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge of lage extreme temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogte tijdens gebruik, opslag of vervoer. Het wegwerpen van de batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van de batterij kan resulteren in een explosie. Het achterlaten van de batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas. Het blootstellen van de batterij aan een extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

Normale bedrijfstemperatuur voor het product (bijv. 0 oC ~ 40oC). Gebruik alleen de hieronder vermelde batterij.

⚠️📖 Alkaline Batterijen : TYPE: AA 1,5V x 2 st.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u de deurbelapparatuur gebruikt, moet u altijd de voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid in acht nemen om gevaren van brand, elektrische schokken en verwonding te minimaliseren waaronder het volgende:

1. Lees en begrijp alle instructies.
2. Neem alle op het product aangegeven waarschuwingen en instructies in acht.
3. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
4. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of extreem koude temperaturen. Plaats het product niet vlakbij een warmtebron zoals radiatoren, fornuizen, enz.
5. Neem dit product uit het stopcontact en neem contact op met de

distributeur voor reparaties in de volgende omstandigheden:


- Als het product niet normaal werkt terwijl u de bedieningsinstructies volgt.
- Als het product gevallen en het omhulsel beschadigd is.
- Als het product een opvallende prestatieverandering vertoont.

6. Let op de juiste polariteit als u de batterijen er in steekt.

VAN START GAAN


Inhoud van de verpakking

De verpakking bevat het volgende: Deurbel, 2 AA batterijen, Handleiding, Schroeven en ankers

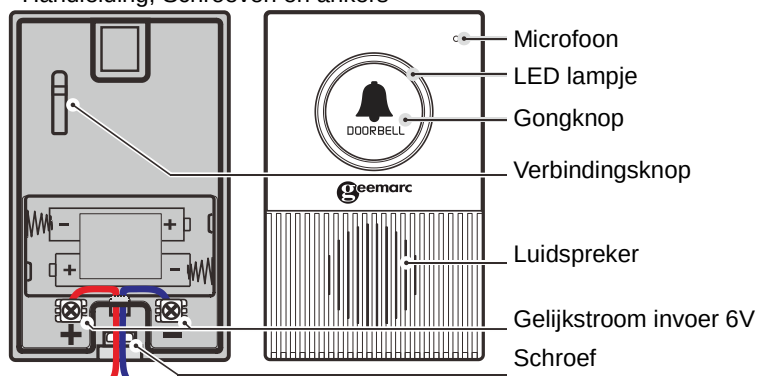

De batterijen in de deurbel installeren

1. Verwijder de schroef aan de onderzijde.
2. Duw om het deksel van de muurbevestiging aan de achterkant te verwijderen.
3. Plaats twee AA batterijen in het batterijvakje; let op de polariteitmarkeringen (+ en -) in het batterijvakje.
4. Duw om het deksel van de muurbevestiging terug te plaatsen over het batterijvakje en steek de schroef erin.

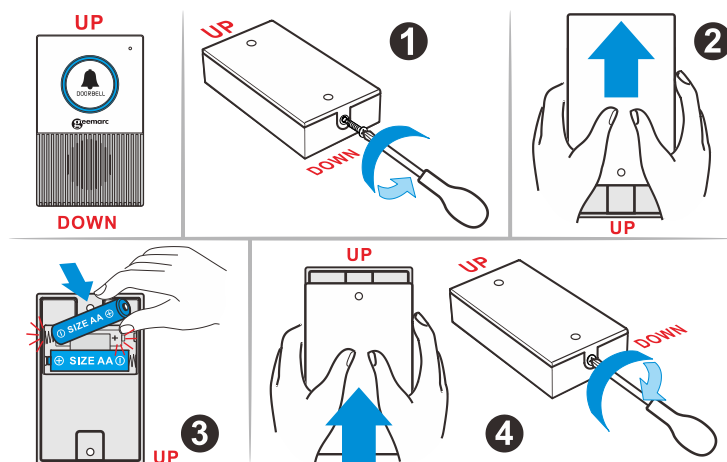

REGISTRATIE


Aanmelden

Als u een extra deurbel koopt, volg dan de procedure in het volgende hoofdstuk.

Als de deurbel samen met de AMPLIDECT595 U.L.E. in één verpakking verkocht wordt, hoeft u het niet te registreren.

Simpele registratie voor een audio deurbel

1. Verzeker u ervan dat de deurbel (inclusief de batterijen) aan staat voordat u het registreert op basisstation van de telefoon.
2. Druk op / **Handset Opzoeker** op het basisstation van de AD595 ULE en houdt deze ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
3. Druk op de verbindingsknop van de audio deurbel en houdt deze ingedrukt totdat het blauwe LED lampje begint te fllikkeren. Nu is de audio deurbel aangemeld op de AD595 ULE.

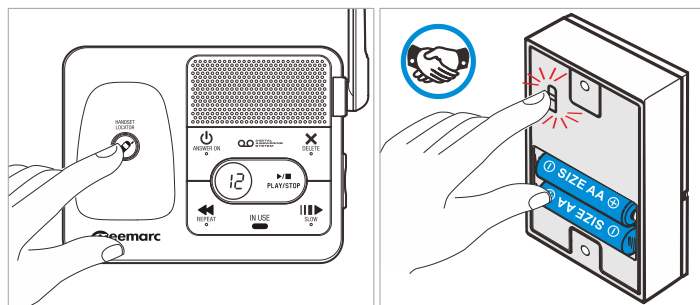

Als de audio deurbel met succes op het basisstation is aangemeld, hoort u pieptonen ter bevestiging.

NB: Het maximum aantal deurbellen dat u kunt verbinden met de AD595 ULE is **twee (2)**.

INSTALLATIE / GEBRUIK

Installeer de deurbel, druk op de deurbel en controleer dat de afstandsbediening correct verbonden is en binnen het bereik van de AD595 ULE is om die over te doen gaan.

Tijdens een deurbelalarm: druk op de groene knop van de handset om communicatie tussen de handset en de afstandsbediening tot stand te brengen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen hebt met uw telefoon, probeer dan de nu volgende suggesties te volgen:

Probleem	Oplossing
LED lampje op de deurbel flinkt niet als het ingedrukt wordt	- Verzekert u ervan dat twee AA batterijen erin zitten en verbindt netspanning met de deurbel. - De deurbel kan zonder batterijvoeding zitten. U moet deze vervangen met nieuwe batterijen.
De deurbel werkt niet met de apparatuur van het telefoonsysteem	- Verzekert u ervan dat de deurbel geregistreerd is op het telefoonstelsysteem. - Als de vorige suggesties niet werken, meld dan alle toestellen af en meld ze opnieuw aan op het basisstation van de telefoon.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie controle	Kristal gecontroleerde PLL synthesizer
Zendfrequentie	1,88 GHz – 1,9 GHz
Kanalen	10
RF vermogen	< 250mW
Nominaal effectief bereik	Binnenshuis: 50m / Buitenshuis: 300m
Voedingsvereisten	Twee (2) AA alkaline batterijen

VERZORGING EN ONDERHOUD

Uw audio deurbel verzorgen

- Uw audio deurbel bevat geavanceerde elektronische onderdelen en u moet het daarom met zorg behandelen.
- Vermijdt ruwe behandeling.
- Zet de audio deurbel voorzichtig neer.
- Bewaar de originele verpakking om uw audio deurbel te beschermen als u het ooit moet opsturen.

Vermijd water

U kunt uw audio deurbel beschadigen als die nat wordt. De audio deurbel NIET in regen gebruiken en NIET behandelen met natte handen. Het audio deurbel NIET installeren vlakbij een gootsteen, badkuip of douche.

Onweer

Onweer kan overspanning veroorzaken die schadelijk zijn voor elektronische apparaten. Wees voorzichtig voor uw eigen veiligheid met het gebruik tijdens onweer.

Uw deurbel schoonmaken

Uw audio deurbel heeft een duurzame plastic behuizing die haar glans vele jaren lang behoudt. Maak het alleen maar schoon met een met water of een milde zeep bevochtigde zachte doek. Gebruik geen overtollig water of schoonmaakmiddelen van ongeacht welk soort dan ook.

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor een periode van 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

VERKLARINGEN

CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.

Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

Geemarc Telecom

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE

Telefon 00 49(0) 228 548 89 932

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.

Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

This product is made in China To Geemarc Telecom



QUGDOORBELL595 U.L.E._NL_A4_V1.3



BEKNOPTE HANDLEIDING

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.

Normale bedrijfstemperatuur voor het product (bijv. 0 oC~40oC).
Gebruik alleen de hieronder vermelde adapter.

 Informatie over de voedingsadapter: uitgang: 6V DC 0.45A, 2.7W. Vtech Telecommunications Limited. Model: VT05EEU06045 (EU), VT05EUK06045 (UK)

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u uw apparatuur gebruikt, moet u altijd de voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid in acht nemen om gevaren van brand, elektrische schokken en verwonding te minimaliseren waaronder het volgende:

- Plaats dit product NIET op een instabiele plank, standaard, tafel of een ander oppervlak.
- Gebruik de belverlenging van de bewegingsdetectie NIET in de volgende gebieden die vervorming, storing of uitval kunnen veroorzaken:
 - Onder direct zonlicht
 - Blootstelling aan vochtigheid of stoom (bijv. keukens)
 - In de buurt van vuur of verwarmingstoestellen
 - Onderhevig aan extreme temperatuurschommelingen (bijv. in de buurt van airconditioners)
 - Met infrarood (IR) ondoorlaatbare of weerspiegelende objecten die de voor detectie benodigde IR energie kunnen blokkeren.
 - Waar de temperatuur beïnvloed wordt door sterk verlichtende objecten (bijv. halogeenlampen)

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAT ZIT ER IN DE DOOS




Belverlenging



Voedingsadapter

Uw verpakking bevat de bovenstaande artikelen. Bewaar uw aankoopbewijs en de originele verpakking voor het geval dat gegarandeerde dienstverlening nodig is.

OVERZICHT V/D BELVERLENGING

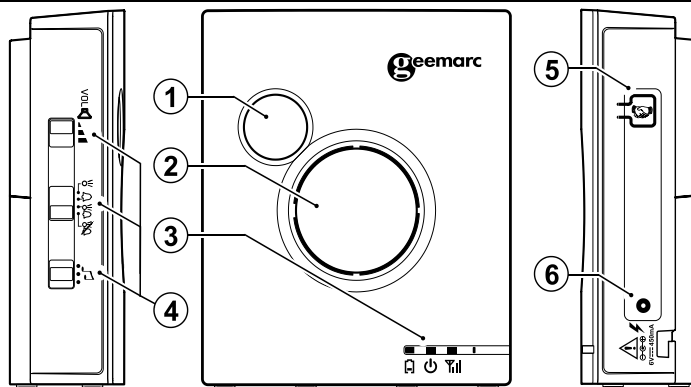

1. Knipperend LED lampje (wit)

- Knippert als het een binnenkomende oproep ontvangt of als de aangemelde toestellen geactiveerd worden.

2. Luidspreker

3. LED indicatoren ()

-  Groen als de belverlenging aangezet is.
-  Rood als de batterijvoeding te laag is.
-  Amber terwijl de signaalsterkte gecontroleerd wordt.

4. Schakeltoetsen aan de zijkant

    Verschuif deze toets om te switchen tussen de belvolumes (laag, medium of hoog).

   Verschuif deze toets om the switchen tussen de alarmstanden (alleen knipperen (), alleen melodie (), knipperen & melodie ()) of alles uit ().

 Verschuif deze toets om the switchen tussen drie verschillende belmelodieën.

5. Verbindingsknop

- Druk hierop en houdt het 5 seconden ingedrukt om de verbindingstand te verkrijgen.

6. Stekerbus voor de voeding


VOORAFGAAND AAN GEBRUIK

Batterij-installatie (apart aangeschaft)

- Duw omlaag om het deksel van de muurbevestiging aan de achterkant te verwijderen.
- Plaats drie **AA batterijen** in het batterijvakje; let op de polariteitmarkeringen (+ en -) in het batterijvakje.

De belverlenging aanzetten

Steek de kleine stekker van de adapter in de stekkerbus van de belverlenging en de grote stekker in de contactdoos.

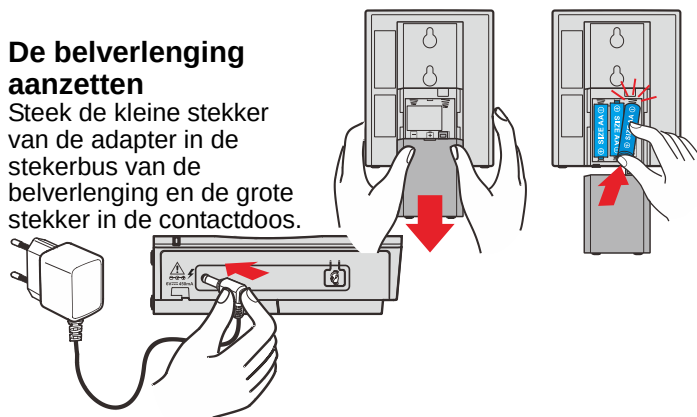

EEN BELVERLENGING TOEVOEGEN EN REGISTREREN

Voeg uw nieuwe **Ringer595 U.L.E** belverlenging toe aan het basisstation van uw telefoon. U moet deze aanmelden als dit een extra belverlenging is die niet in de verpakking van uw originele belverlenging zat. Een nieuwe belverlenging moet voor gebruik aangemeld worden op het basisstation van uw **AD595 U.L.E** telefoon.

De belverlenging aanmelden:

1. Verzeker u ervan dat de belverlenging aan staat met batterij- of gelijkstroomvoeding voordat u het registreert op basisstation van de telefoon.
2. **Druk op**  / **Handset Opzoeker** op het basisstation van de telefoon en **houdt deze ingedrukt** totdat u een pieptoon hoort.
3. **Druk op** de **verbindingssknop**  (5) aan de zijkant van de belverlenging en **houdt deze ingedrukt** totdat het **groene knipperende LED lampje**  (3) begint te knipperen.
4. U hoort pieptonen ter bevestiging als de belverlenging met succes op het basisstation is aangemeld.

Een belverlenging vervangen

Als u deze nieuwe **Ringer595 U.L.E** belverlenging heeft gekocht ter vervanging van een oude belverlenging moet u eerst de aangemelde belverlenging afmelden en daarna deze nieuwe belverlenging aanmelden op het basisstation van uw **AD595 U.L.E** telefoon.

ALGEMENE VERZORGING V/H PRODUCT

Uw belverlenging verzorgen

Uw belverlenging bevat geavanceerde elektronische en optische onderdelen en u moet het daarom met zorg behandelen.

Vermijdt ruwe behandeling

Zet de belverlenging voorzichtig neer. Bewaar het originele verpakkingsmateriaal om uw telefoon te beschermen als u het ooit moet opsturen.

Vermijd water

Uw belverlenging kan beschadigd worden als die nat wordt. De belverlenging NIET buiten gebruiken in de regen en NIET behandelen met natte handen. Het belverlenging NIET installeren vlakbij een gootsteen, badkuip of douche.

Onweer

Onweer kan soms overspanning veroorzaken die schadelijk zijn voor elektronische apparaten. Wees voorzichtig voor uw eigen veiligheid met het gebruik van elektrische apparaten tijdens onweer.

Uw belverlenging schoonmaken

Uw belverlenging heeft een duurzame plastic behuizing die haar glans vele jaren lang behoudt. Maak het alleen schoon met een droge, niet-schurende doek. Gebruik geen vochtige doek of schoonmaakmiddelen van ongeacht welk soort dan ook.

OPSLAG

Als u de belverlenging voor langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen uit de belverlenging nemen. Sla de belverlenging op in een koele, droge plek.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder staan veelgevraagde vragen over de belverlenging.

Probleem	Oplossing
De belverlenging werkt niet met de apparatuur van het telefoon-systeem	• Verzeker u ervan dat er AA batterijen in zitten of verbonden is met de netspanning. • De belverlenging kan afgemeld zijn van uw telefoonsysteem. Raadpleeg Een belverlenging toevoegen en registreren en registreer de belverlenging opnieuw. • De belverlenging kan buiten bereik zijn. Verplaats de belverlenging dichtbij uw telefoonsysteem. • Als de vorige suggesties niet werken, meld dan alle toestellen af en meld ze opnieuw aan op het basisstation van de telefoon.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Frequentie controle	Kristal gecontroleerde PLL synthesizer
Zendfrequentie	1881,792 MHz – 1897,344 MHz
Kanalen	10
RF vermogen	< 250mW
Nominaal bereik	effectief Op het moment van gebruik kan het bereik variëren afhankelijk van de omgevingsituatie.
Voedingsadapter	Input: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Output: 6V/450mA
Voedingsvereisten	3 AA alkaline batterijen

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

VERKLARINGEN



CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Radio en Telecommunicatie Eindapparatuur Richtlijn.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.

Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.

Geemarc Telecom

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHÉ CEDEX, FRANCE
Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**

Manufacturer: Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.

This product is made in China To Geemarc Telecom